

elma clean 25 (EC 25)

**ALGINAT- UND GIPSENTFERNER
GEBRAUCHSFERTIGES WÄSSRIGES REINIGUNGSBAD**

Beschreibung

Gebrauchsfertiges Reinigungsbad. Gut geeignet zur gründlichen Ultraschall-Reinigung von:

- Abdrucklöffeln und zahnärztlichen Instrumenten,
- Instrumenten aus Edelstahl, Glas und Keramik,
- Kunststoffen.

Entfernt: Alginate, Dentalgipse.

Leichtmetall-Legierungen (Al, Mg, Zn) zuvor auf Beständigkeit prüfen. Anlaufgefahr bei schlecht vernickelten Materialien (z.B. alte Abdrucklöffel).

Anwendung und Dosierung

Alginate: unverdünnt bei 60 – 70 °C ca. 15 – 45 min. im Ultraschallbad; Alginate lassen sich danach leicht von Abdrucklöffeln abheben.

Dentalgipse: bei 40 – 70 °C ca. 1 – 3 min. im Ultraschallbad.

Nach dem Reinigen gut unter fließendem Wasser abspülen und evtl. Reste abbürsten.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

elma clean 25 (EC 25) ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [GHS] als gefährlich (augenreizend) eingestuft. Bitte beachten Sie auch dazu die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt und gehen Sie sorgfältig mit dem Produkt um.

Physikalisch-Chemische Charakterisierung

Dichte: 1,098 g/ml, pH ~11,7 im Lieferzustand.

Inhaltsstoffe gemäß Anhang VII, A, EG-DetergenzienVO 648/2004: <5% anionische Tenside.

Entsorgung des Reinigungsbades

Die enthaltenen Tenside sind gemäß Anhang III der EU-Detergenzienverordnung VO (EG) Nr. 648/2004 biologisch abbaubar.

Das Reinigungsbad kann nach Gebrauch entsprechend den örtlichen pH-Grenzwerten in das Abwasser gegeben werden, sofern die eingebrachte Verschmutzung das zulässt.

Abfallschlüssel: 07 06 01*, „wässrige Waschflüssigkeiten und Mutterlaugen“.

Verpackung nur restentleert in das Rücknahmesystem für Leichtverpackungen geben.

Lieferformen, Lagerung und Transport

Gebinde: 1 Liter Flasche; 2,5 Liter, 10 Liter und 25 Liter HDPE-Kanister.

Nur im geschlossenen Originalbehälter zwischen +5 °C und +35 °C, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren.

5 Jahre ab Produktionsdatum (siehe Stempelaufdruck auf dem Etikett) lagerfähig.

Das Produkt ist kein Gefahrgut gemäß GGV für alle Transportarten.

Elma Schmidbauer GmbH

Gottlieb-Daimler-Str. 17, D-78224 Singen

e-mail: info@elma-ultrasonic.com

15.04.2015 / P:\Produkte\PROInfo\Produkte\deutsch\word_DVP_EC 25_D.docx

Tel.: +49 7731 882-0

Fax: +49 7731 882-266

www.elma-ultrasonic.com

