

elma clean 40 (EC 40)

ZAHNZEMENTENTFERNER

WÄSSRIGES SAURES REINIGUNGSKONZENTRAT

Beschreibung

Das Reinigungskonzentrat entfernt wirkungsvoll und schnell Zemente von Kronen, Brücken, zahnärztlichen und medizinischen Instrumenten aus Edelstahl, Keramik, Kunststoff, Glas, Gummi.

Löst Zahnzemente einschl. Phosphatzemente, Metalloxid, Kalk und Flussmittel ab. Nicht geeignet für Leichtmetalle (z.B. Al, Mg, Zn und Leichtmetall-Legierungen).

Anwendung und Dosierung

Dosierung: 5 - 10%ig (entspricht 50 – 100 ml *elma clean 40 (EC 40)* auf 1 Liter Lösung mit Stadtwasser). Reinigungszeit im Ultraschallbad bei Raumtemperatur: 5 - 10 Minuten. Danach gründlich unter fließendem Wasser abspülen.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

elma clean 40 (EC 40) ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [GHS] als gefährlich eingestuft (hautätzend und schwer augenschädigend, korrosiv gegenüber Metallen [Aluminium und Leichtmetalle]). Bitte beachten Sie auch dazu die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt und gehen Sie sorgfältig mit dem Produkt um.

Physikalisch-Chemische Charakterisierung

Dichte: 1182 g/l, pH (Konzentrat): 0,6 im Lieferzustand.

Inhaltsstoffe gemäß Anhang VII, A, EG-DetergenzienVO 648/2004: 15-30% Phosphorsäure.

Entsorgung des Reinigungsbades

Das Reinigungsbad kann nach Gebrauch entsprechend den örtlichen pH-Grenzwerten in das Abwasser gegeben werden, sofern die eingebrachte Verschmutzung das zuläßt. Konzentrat vorher neutralisieren.

Neutralisationsempfehlung: Mit Kalk oder mit Natronlauge neutralisieren.

Abfallschlüssel: 20 01 14*; „Säuren“.

Verpackung nur restentleert in das Rücknahmesystem für Leichtverpackungen geben.

Lieferformen, Lagerung und Transport

Gebinde: 1Liter PE-Flasche; 10Liter und 25Liter HDPE-Kanister.

Nicht zusammen mit Laugen lagern. Säurebeständigen Fußboden vorsehen. Nur im geschlossenen Originalbehälter oberhalb -5°C, vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren. Trocken lagern.

5 Jahre ab Produktionsdatum (siehe Stempelaufdruck auf dem Etikett) lagerfähig.

Das Produkt ist Gefahrgut (Klasse 8, UN 1805) gemäß GGv für alle Transportarten.

Elma Schmidbauer GmbH

Gottlieb-Daimler-Str. 17, D-78224 Singen

e-mail: info@elma-ultrasonic.com

29.09.2015 / E:\PRODUKTINFO\deutsch\word_D\IP_EC 40_D.docx

Tel.: +49 7731 882-0

Fax: +49 7731 882-266

www.elma-ultrasonic.com

